

Så här fungerar testet

Publicerad 2010-05-19 | Uppdaterad 2011-10-20

DELATIPSASKRIV UT

[Facebook](#)[Twitter](#)[Blogger](#)[Wordpress](#)[Digg](#)[Pusha](#)[Bloggy](#)[Tipsa](#)




I förpackningen finns allt som behövs för att enkelt använda testet hemma. Förpackningen innehåller instruktioner, en bomullspinne för ett slidprov och frankerad försändelse till laboratoriet. Testet går snabbt och enkelt och resultatet är lika säkert som hos läkare.

Om analysen påvisar klamydiabakterier får du remiss och kontaktuppgifter för läkarvård.

Symptom som kan uppstå hos kvinnor är: sveda när man kissar, mellanblödningar, flytningar från underlivet och smärta nedtill i magen.


GÖR SÅ HÄR:

Viktigt att följa instruktionerna noga! Du ska inte ta provet vid menstruation eller direkt efter samlag. När du tagit provet ska du omgående skicka det till laboratoriet för analys. I kartongen ligger provtagningsmaterial som består av en steril provtagningspinne i en skyddsbehållare (rör) och en bipacksedel.

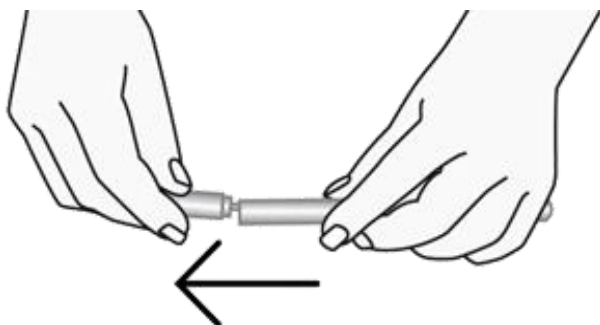

VIKTIGT! Kom ihåg att underteckna bipacksedeln.


1. Öppna kartongen. I paketet finns ett rör med en bomullspinne och en bipacksedel. Fyll i bipacksedeln och underteckna den. Lossa försiktigt etiketten med analysnumret från bipacksedeln och klistra den på bomullspinnens röda kork. **VIKTIGT!** Den nedre delen på bipacksedeln, som innehåller din kod, ska du riva av och behålla hemma. Koden behöver du för att hämta ut ditt svar. Vrid loss korken på röret. Du får en bomullspinne att ta slidprovet med. Vidrör inte bomullsdelen på pinnen.

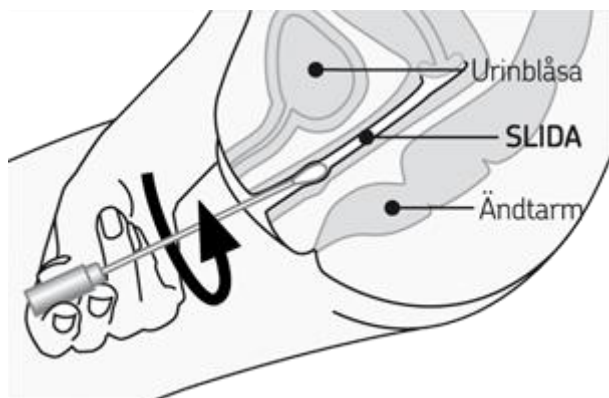

2. För in bomullspinnen 5 cm i slidan. Tryck bomullsdelen mot slidväggen samtidigt som du roterar den 4-6 gånger.



3. **VIKTIGT!** Låt bomullsspinnen torka i minst 3 minuter genom att den vilar mot röret med bomullsdelen uppåt. Bomullsdelen ska inte vidröra något. Du kan även hålla pinnen med bomullsdelen uppåt.

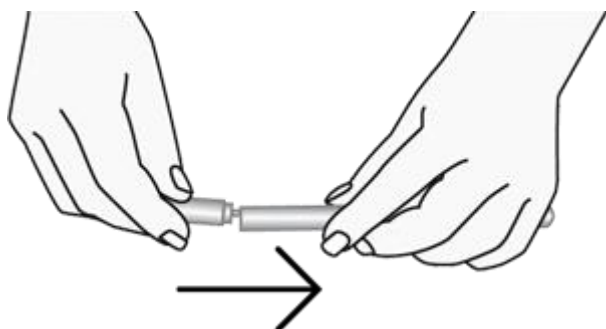

4. Stoppa tillbaka bomullspinnen i röret och se till att korken blir itryckt.

5. Lägg tillbaka röret med bomullspinnen och den **undertecknade** bipacksedeln i kartongen. Förslut kartongen. Riva av denna instruktionsdel och kartongens upphängningsflik. Kartongen används nu som returemballage. Posta den förbetalda försändelsen.

Analysvar kan hämtas via www.vitadix.com, eller brevsva. Du behöver din kod som finns på bipacksedeln, för att kunna hämta ditt svar.

VIKTIGT ATT RIVA AV OCH SPARA DIN KOD!