

Så här fungerar testet

Publicerad 2010-04-20 | Uppdaterad 2011-10-20

DELATIPSASKRIV UT

[Facebook](#)[Twitter](#)[Blogger](#)[Wordpress](#)[Digg](#)[Pusha](#)[Bloggy](#)[Tipsa](#)



I förpackningen finns allt som behövs för att enkelt använda testet hemma. Allt som behövs är ett urinprov. Förpackningen innehåller instruktioner, provtagningsmaterial för urinprov och frankerad försändelse till laboratoriet. Testet går snabbt och enkelt och resultatet är lika säkert som hos läkare.


Om analysen påvisar klamydiabakterier får du remiss och kontaktuppgifter för läkarvård.


Symptom som kan uppstå hos män är: sveda när man kissar, urinströsinflammation och flytningar från urinröret.

GÖR SÅ HÄR:

Viktigt att följa instruktionerna noga! Vi rekommenderar att du tar provet vid morgonurinering och postar provet till laboratoriet samma dag. Undvik att posta dag före helgdag eller under helger (då posten är stängd), eftersom provets ankomst till laboratoriet då blir försenad och provet kan bli förstört. Du ska inte ha kissat inom två timmar före provtagning. Provet skall inte tas direkt efter samlag. I kartongen ligger provtagningsmaterial som består av en provpinne i en skyddsbehållare (rör) och en bipacksedel.

VIKTIGT! Kom ihåg att underteckna bipacksedeln.

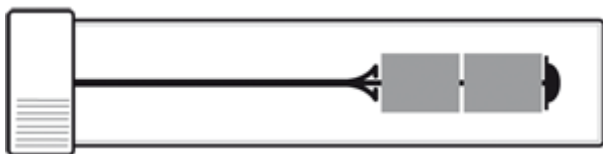


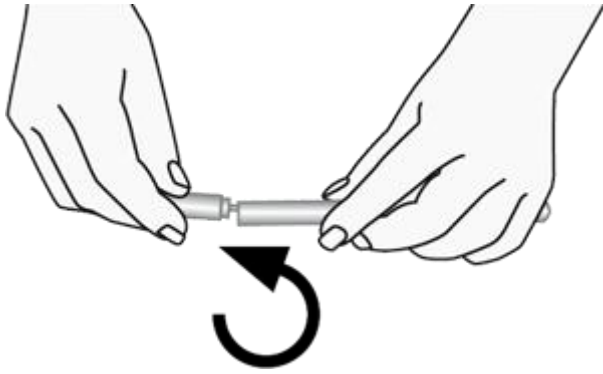

1. Öppna kartongen. I paketet finns en provpinne i ett rör och en bipacksedel. Fyll i provtagningsdatum på avsedd plats på rörets etikett. Fyll i bipacksedeln och underteckna den. Lossa försiktigt etiketten med analysnumret från bipacksedeln och klistra den på provröret (klistra ej över ifyllt datum). **VIKTIGT!** Den nedre delen på bipacksedeln, som innehåller din kod, ska du riva av och behålla hemma. Koden behöver du för att hämta ut ditt svar. Vrid loss korken på röret. Du får en provpinne att fänga upp urinen med. Vidrör inte mjuka delen på pinnen.



2. Samla upp den första urinmängden genom att kissa på den mjuka delen av pinnen. Det är denna del som suger upp urinen. Stoppa tillbaka provpinnen i skyddsbehållaren (röret).

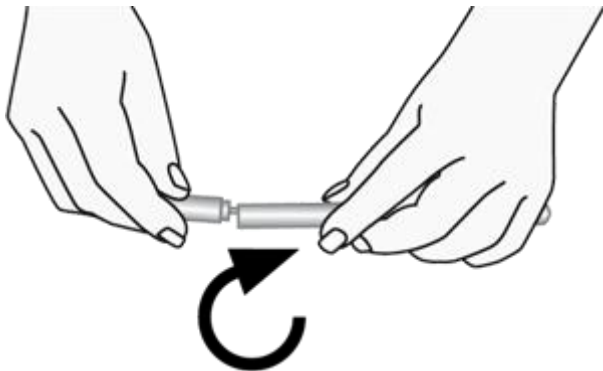

3. Skruva fast locket **ordentligt**.

4. Lägg tillbaka röret med provpinnen och den **undertecknade** bipacksedeln i kartongen. Förslut kartongen. Riv av denna instruktionsdel och kartongens upphängningsflik. Kartongen används nu som returemballage. Posta den förbetalda försändelsen.

Analysvar kan hämtas via www.vitadix.com, eller brevvar. Du behöver din kod, som finns på bipacksedeln, för att kunna hämta ut ditt svar.

VIKTIGT ATT RIVA AV OCH SPARA DIN KOD!